

Rutgers Hoortechniek

Standard Charger

GEBRUIKSAANWIJZING



Synergy oplader



Eigenschappen, bedieningselementen en identificatie

1. Houder voor droogtablet
2. Reinigingsborsteltje
3. Bakje voor dome/oorstukje
4. Oplaadcontacten
5. LED-lampjes hoortoestel opladen
6. LED-lampjes geïntegreerde batterij
7. Micro USB poort



Uw hoortoestellen opladen



- Plaats uw hoortoestellen in de oplader met de dome binnen de behuizing
- De hoortoestellen worden automatisch uitgeschakeld en het opladen begint
- Let op: het LED lampje per hoortoestel:
 - Gloeit pulserend groen = bezig met opladen
 - Constant groen = volledig opgeladen*
 - Knippert rood = foutstatus – neem hoortoestel van de oplader, wacht tot het LED lampje uitgaat en plaats het hoortoestel opnieuw. Neem contact op met uw audicien indien de foutstatus aanhoudt.

** Indien u zonder netsnoer oplaadt, worden de LED-lampjes wanneer het opladen voltooid is uitgeschakeld om de batterij te sparen.*

- Opladen kan met open of gesloten deksel plaatsvinden
- Uw hoortoestellen zijn binnen 3 ½ uur volledig opgeladen
- U kunt de hoortoestellen veilig in de oplader bewaren wanneer u ze niet draagt, ook nadat ze volledig opgeladen zijn
- Indien u de hoortoestellen gedurende een langere periode (meerdere weken) niet zult dragen: haal de stekker uit de oplader en neem de hoortoestellen van de oplaadcontacten. U moet de hoortoestellen handmatig uitschakelen door de drukknop drie seconden lang ingedrukt te houden. U kunt de toestellen in het bakje opbergen
- Uw hoortoestellen worden automatisch ingeschakeld wanneer ze van de oplader worden genomen
- Indien u de hoortoestellen oplaadt zonder het netsnoer, doven de LED lampjes wanneer de hoortoestellen volledig zijn opgeladen
- Om de LED lampjes te activeren wanneer de oplader niet op netstroom is aangesloten, neemt u een hoortoestel gedurende drie seconden van het oplaadcontact en plaatst u het vervolgens weer op de oplader (activatie houdt slechts 10 seconden aan – daarna worden de LED lampjes weer uitgeschakeld)

LED-lampjes geïntegreerde batterij



- Wanneer de oplader op netstroom aangesloten en volledig opgeladen is, branden er 4 LED's
- Bij opladen zonder netsnoer doven de LED lampjes na 10 seconden
- Om de LED lampjes te activeren, neemt u een hoortoestel gedurende drie seconden van het oplaadcontact en plaatst u het vervolgens weer op de oplader (activatie houdt slechts 10 seconden aan – daarna worden de LED lampjes weer uitgeschakeld)
 - 4 brandende LED's > 75%
 - 3 brandende LED's < 75%
 - 2 brandende LED's < 50%
 - 1 brandende LED < 25%
 - 1 knipperende LED = capaciteit laag
- Bij het opladen van de geïntegreerde batterij met het meegeleverde snoer, zullen de 4 LED lampjes:
 - Gloeien tijdens het opladen
 - Constant branden indien volledig opgeladen

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA



Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom



Waste from electronic equipment must
be handled according to local regulations



Consult Operations Manual

Fabrikant

Starkey Laboratories
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

www.starkey.nl
www.starkey.be

Starkey Nederland en België

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl

