

Pure 10 Nx

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Welkom | 4 |
| <hr/> | |
| Uw hoortoestellen | 5 |
| <hr/> | |
| Type toestel | 5 |
| Componenten en benamingen | 6 |
| Bedieningsregelaars | 8 |
| Luisterprogramma's | 9 |
| Functies | 9 |
| Batterijen | 10 |
| <hr/> | |
| Batterijformaat en hanteertips | 10 |
| Batterijen vervangen | 11 |
| Dagelijks gebruik | 12 |
| <hr/> | |
| In- en uitschakelen | 12 |
| De hoortoestellen in- en uitdoen | 13 |
| Het volume aanpassen | 17 |
| Het kiezen van een luisterprogramma | 17 |
| Bijzondere luistersituaties | 18 |
| <hr/> | |
| Aan de telefoon | 18 |
| Onderhoud en verzorging | 19 |
| <hr/> | |
| Hoortoestellen | 19 |
| Oorstukjes | 20 |
| Professioneel onderhoud | 22 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Meer informatie | 23 |
| Veiligheidsinformatie | 23 |
| Accessoires | 23 |
| In dit document gebruikte symbolen | 23 |
| Problemen oplossen | 24 |
| Specifieke nationale informatie | 25 |
| Service en garantie | 27 |

Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze hoortoestellen. Natuurlijk heeft u, net zoals met alle nieuwigheden, even tijd nodig om hiermee vertrouwd te raken.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die uw hoortoestellen u zullen bieden.

Om zoveel mogelijk uit uw hoortoestellen te halen, adviseren wij u om ze elke dag een hele dag lang te dragen. Hierdoor zult u er snel aan gewend raken.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidshandleiding grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te voorkomen.

Uw hoortoestellen



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft optionele functies waarover uw hoortoestellen al dan niet kunnen beschikken.

Vraag uw audicien om aan te geven welke functies geldig zijn voor uw hoortoestellen.

Type toestel





U heeft een RIC (Receiver-in-Canal (luidspreker-gehoorgang)) model hoortoestellen. De luidspreker wordt in de gehoorgang geplaatst en met het toestel verbonden via een luidsprekerverbinding. De toestellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.

Componenten en benamingen





-
- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Oorstukje | 6 Batterijlade (aan-/uit-schakelaar) |
| 2 Luidspreker | |
| 3 Luidsprekerverbinding | 7 Zijde-indicatie (rood = rechter oor, blauw = linker oor) en verbinding met de luidspreker |
| 4 Microfoonopeningen | |
| 5 Druknop (optioneel) | |
-

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

| Standaard oorstukjes | Formaat |
|--|----------------|
| <input type="radio"/>  Click Sleeve (geventileerd of gesloten) | |
| <input type="radio"/>  Click Dome™ enkel (open of gesloten) | |
| <input type="radio"/>  Click Dome semi open | |
| <input type="radio"/>  Click Dome dubbel | |

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Op maat gemaakte oorstukjes

| | |
|--|--|
| <input type="radio"/>  Op maat gemaakt oorstukje | |
| <input type="radio"/>  Click Mold™ | |

Bedieningsregelaars

Met de bedieningsregelaars kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. Uw hoortoestellen hebben een druktoets of geen bedieningsregelaar.

Uw audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de druktoets.

| Bedieningsregelaar | Links | Rechts |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Druktoets | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Geen bedieningsregelaar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



U kunt uw audicien ook vragen of er een afstandsbediening of smartphone app beschikbaar is waarmee uw toestellen bediend kunnen worden.

| Functie drukknop | L | R |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Druk kort: | | |
| Programmawisseling | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Druk lang: | | |
| Stand-by/inschakelen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

L = Links, R = Rechts

Luisterprogramma's

1

2

3

4

5

6

Lees meer in hoofdstuk
"Het kiezen van een luisterprogramma".

Functies

- Dankzij de **inschakelvertraging** kunt u hoortoestellen zonder fluitgeluiden inbrengen.
Lees meer in hoofdstuk "In- en uitschakelen".

- De **tinnitus-therapiefunctie** genereert een geluid dat u afleidt van uw tinnitus.

Batterijen

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het geluid zwakker en/of hoort u een waarschuwingssignaal. Het type batterij zal bepalen wanneer u de batterij dient te vervangen.

Batterijformaat en hanteertips

Vraag uw audicien naar de aanbevolen batterijen.

Batterijformaat:

10

- Gebruik steeds het juiste batterijformaat voor uw hoortoestellen.
- Verwijder de batterijen als u de hoortoestellen enkele dagen niet wilt gebruiken.
- Draag steeds reservebatterijen bij u.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk en volg uw plaatselijk regelgeving met betrekking tot het verwijderen van batterijen.


Batterijen vervangen

De batterij verwijderen:

- ▶ Open de batterijlade.



- ▶ Gebruik de magneetstick om de batterij te verwijderen.
De magneetstick is verkrijgbaar als accessoire.

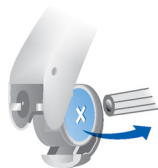

De batterij plaatsen:

- ▶ Als de batterij een beschermende folie heeft, dient u deze pas te verwijderen wanneer u klaar bent om de batterij te gebruiken.



- ▶ Plaats de batterij met het "+"-symbool omhoog (raadpleeg de afbeelding).



- ▶ Sluit de batterijlade voorzichtig. Als u een weerstand voelt, is de batterij niet goed geplaatst.

Gebruik niet veel kracht bij het sluiten van de batterijlade. De lade zou beschadigd kunnen raken.

Dagelijks gebruik

In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw hoortoestellen in of uit te schakelen.

Via de batterijlade:

- ▶ Inschakelen: Sluit de batterijlade.
Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.
- ▶ Uitschakelen: Open de batterijlade tot de eerste stop.

Via de drukknop:

- ▶ In- of uitschakelen: Druk op de drukknop en houd deze gedurende een aantal seconden ingedrukt. Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Na het inschakelen blijven het **laatst** gebruikte volume en luisterprogramma ingesteld.

Wanneer u de hoortoestellen draagt, kan een optionele signaaltoon aangeven wanneer een toestel in- of uitgeschakeld wordt.

Wanneer de **inschakelvertraging** geactiveerd is, schakelen de hoortoestellen met enkele seconden vertraging in. Gedurende die tijd kunt u de hoortoestellen indoen zonder een vervelend fluitgeluid te horen.

De "inschakelvertraging" kan door uw audicien worden geactiveerd.

De hoortoestellen in- en uitdoen

Uw hoortoestellen zijn afgesteld op uw rechter en linker oor. Kleurmarkeringen geven de zijde aan:


- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor



Een hoortoestel indoen:

- ▶ Voor Click Sleeves, zorg dat de bocht van de Click Sleeve in lijn ligt met de bocht van de luidsprekerverbinding.

Goed:

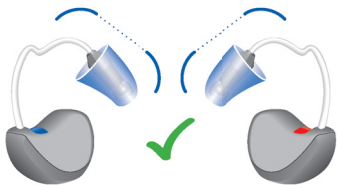


Fout:



- ▶ De luidsprekerverbinding vasthouden bij de bocht die het dichtst bij het oorstukje ligt.
- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang ①.
- ▶ Iets draaien, tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om luchtophoping in de gehoorgang te voorkomen.

- ▶ Het hoortoestel oppakken en schuif het over de bovenkant van uw oor ②.

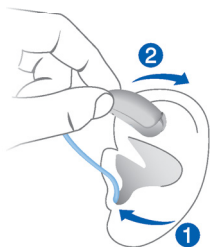

VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.



- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechterhand** en het **linker** hoortoestel met de **linkerhand** in te doen.
- Heeft u problemen met het inbrengen van het oorstukje, gebruik dan uw andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Dit opent de gehoorgang en vereenvoudigt het inbrengen van het oorstukje.

De optionele ConchaLock zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten. Om de ConchaLock te plaatsen:

- Buig de ConchaLock en plaats deze voorzichtig in de binnenrand van uw oorschelp (raadpleeg de afbeelding).




Een hoortoestel uitdoen:

► Til het hoortoestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor **1**.

► Als uw hoortoestel uitgerust is met een op maat gemaakt oorstukje of een Click Mold, verwijdert u deze door het kleine trekkoord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.

► Voor alle andere oorstukjes: Pak de luidspreker in de gehoorgang vast met twee vingers en trek de luidspreker voorzichtig uit het oor **2**.

Trek niet aan de luidsprekerverbinding.

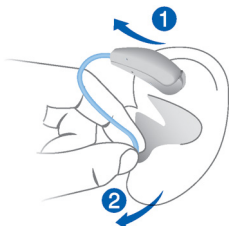

VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- In zeer zelden voorkomende gevallen kan een oorstukje in uw oor achterblijven wanneer u het hoortoestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorstukje dan verwijderen door een medicus.

Reinig en droog uw hoortoestellen na gebruik.

Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen automatisch het volume aan de luistersituatie aan.

- ▶ Als u een handmatige aanpassing van het volume prefereert, gebruikt u hiervoor een afstandsbediening.

Een optioneel signaal kan de volumewijziging aangeven.

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie passen uw hoortoestellen het geluid automatisch aan.

Uw hoortoestellen hebben mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- ▶ Om van luisterprogramma te wisselen, drukt u kort op de drukknop.

Raadpleeg het hoofdstuk “Bedieningsregelaars” om uw bedieningsregelaars in te stellen. Raadpleeg het hoofdstuk “Luisterprogramma’s” voor een lijst van uw luisterprogramma’s.

Het standaard volume wordt toegepast.




U kunt uw audicien ook vragen of er een afstandsbediening of smartphone app beschikbaar is waarmee uw toestellen bediend kunnen worden.

Bijzondere luistersituaties

Aan de telefoon

Wanneer u telefoneert, houdt u de telefoonluidspreker iets boven uw oor. Het hoortoestel en de telefoonluidspreker moeten op elkaar uitgelijnd zijn. Draai de luidspreker lichtjes, zodat het oor niet volledig bedekt is.

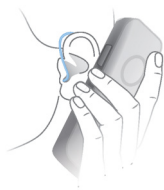

Telefoonprogramma

Wellicht prefereert u een bepaald volume wanneer u de telefoon gebruikt. Vraag uw audicien om een telefoonprogramma te configureren.

- Schakel over naar het telefoonprogramma wanneer u telefoneert.

Of een telefoonprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, is vermeld in het hoofdstuk "Luisterprogramma's".

Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw hoortoestellen en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen gauw deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Hoortoestellen

Drogen en bewaren

- ▶ Droog uw hoortoestellen 's nachts.
- ▶ Wanneer u uw hoortoestellen langere tijd niet gebruikt, bewaart u ze met open batterijlade en verwijderde batterijen in een droge omgeving.
- ▶ Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Reinigen

Uw hoortoestellen zijn voorzien van een beschermende coating. Als ze echter niet regelmatig worden gereinigd, kunnen de hoortoestellen beschadigd raken of kunnen deze persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw hoortoestellen dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de toestellen nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.



- Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsprocedures, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw hoortoestellen in een optimale toestand kunt houden.

Oorstukjes


Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Hierdoor kan de kwaliteit van het geluid beïnvloed raken. Reinig het oorstukje dagelijks.

Voor alle type oorstukjes:


- Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.

Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.

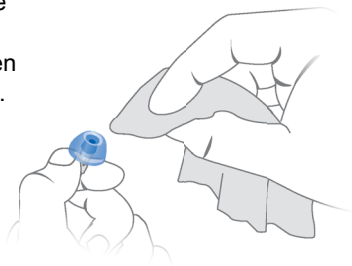

Voor Click Domes of Click Sleeves:

- Het topje van het oorstukje samenknijpen.

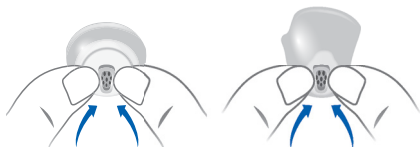


Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk "Componenten en benamingen", heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

Vervangen Click Domes

- ▶ Gebruik om de oude Click Dome te verwijderen het speciale tooltje of volg de instructies op de verpakking van de Click Domes. Zorg ervoor dat u niet trekt aan de kabel van de luidspreker.

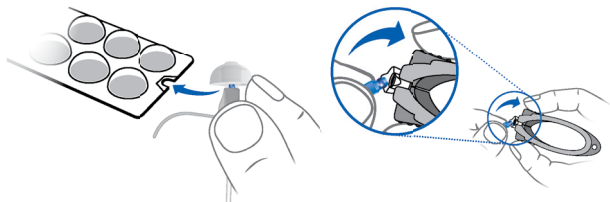

Het speciale tooltje is als accessoire leverbaar.

- ▶ Let er in het bijzonder op dat de nieuwe Click Dome duidelijk op zijn plaats klikt.
- ▶ Controleer of de nieuwe Click Dome stevig vastzit.



Vervangen Click Sleeves

- ▶ Draai de Click Sleeve binnenstebuiten.
- ▶ Pak de Click Sleeve en de luidspreker (niet de luidsprekerverbinding) vast met uw vingers en trek de Click Sleeve los.
- ▶ Zorg er in het bijzonder voor dat de nieuwe Click Sleeve merkbaar op z'n plek wordt geklikt.



Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Meer informatie

Veiligheidsinformatie

Meer informatie over de veiligheid vindt u in de veiligheidshandleiding die met het toestel wordt geleverd.

Accessoires

Het type beschikbare accessoires is afhankelijk van het type toestel. Voorbeelden hiervan zijn: een afstandsbediening of een smartphone app voor bediening op afstand.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

In dit document gebruikte symbolen



Wijst op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw toestel.

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

Het geluid is zwak.

- Verhoog het volume.
 - Vervang de lege batterij.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het hoortoestel maakt een fluitend geluid.

- Plaats het oorstukje opnieuw tot het stevig zit.
 - Verlaag het volume.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het geluid klinkt vervormd.

- Verlaag het volume.
 - Vervang de lege batterij.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het hoortoestel geeft signaaltonen af.

- Vervang de lege batterij.
-

Het hoortoestel werkt niet.

- Schakel het hoortoestel in.
 - Sluit de batterijlade voorzichtig helemaal.
 - Vervang de lege batterij.
 - Controleer dat de batterij op de juiste manier is geplaatst.
 - De inschakelvertraging is actief.
Wacht enkele seconden en controleer opnieuw.
-

Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Specifieke nationale informatie

Service en garantie

| Serienummers | Hoortoestel | Luidspreker |
|---------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|--------------------|

Links:

Rechts:

Servicedatums

| | |
|----|----|
| 1: | 4: |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 2: | 5: |
|----|----|

| | |
|----|----|
| 3: | 6: |
|----|----|

Garantie

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

Uw audicien



Wettelijke fabrikant

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Duitsland

Telefoon: +49 9131 308 0

Document No. 03434-99T02-5400 NL

Order/Item No. 109 550 66

Master Rev01, 12.2017

© 02.2018, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.com